

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam und vollständig, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Produktes beachten müssen. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Paraffinum Med Eifelfango®

Zusammensetzung:

Eine Ampulle *Paraffinum Med Eifelfango*® enthält 10 ml dünnflüssiges Paraffin (= Paraffinum perliquidum). Die Qualität entspricht den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.). Das Produkt wird sterilfiltriert und ist keimfrei sowie frei von Konservierungsmitteln, Antioxidantien und sonstigen Zusätzen.

Produkteigenschaften:

Paraffinum Med Eifelfango® enthält Paraffin niedriger Viskosität und zeichnet sich besonders durch die gute Spreitbarkeit auf der Haut oder auf medizinischen Instrumenten aus. Es erzeugt einen dünnen Film, der die Gleitfähigkeit erhöht und wasserabstoßend wirkt. Dieser Effekt kann ausgenutzt werden, um die Reibung zwischen den Instrumenten und der Haut bzw. Schleimhaut zu reduzieren.

Das Produkt ist keimfrei und kann deshalb auch auf bereits sterilisierten Instrumenten direkt vor Gebrauch angewendet werden.

Zweckbestimmung

Für chirurgische Zwecke



Wichtige Hinweise:

- Nicht zur Injektion!
- Paraffin darf nicht in die Atemwege gelangen!
- Paraffin darf nicht in Wunden tropfen!
- Nicht zusammen mit Latex-Artikeln verwenden!
- Bei der Anwendung zusammen mit anderen Materialien oder Medizinprodukten, z.B. Gummihandschuhen, ist sicherzustellen, dass diese mit Paraffin verträglich sind.
- Nur klaren Inhalt aus unversehrten Ampullen verwenden!

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse dem Hersteller und der zuständigen Behörde:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

Packungsgrößen:

Paraffinum Med Eifelfango® ist in der Packungsgröße 10 x 10 ml erhältlich.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und Lagerung:

- Das Verfalldatum dieser Packung ist außen aufgedruckt. Verwenden Sie *Paraffinum Med Eifelfango*® nicht mehr nach diesem Datum!
- Da keine Konservierungsmittel enthalten sind, dürfen angebrochene Ampullen nicht zur späteren Verwendung aufbewahrt werden!

Was bedeuten die Symbole?

					
Chargen- bezeichnung	verwendbar bis	Bitte Anwenderinformation beachten	Anforderungen der Medizinproduktlinie werden eingehalten	Zeichen für Einmalgebrauch	Hersteller

Anleitung zum Öffnen von OPC-Ampullen:

	
1. Farbpunkt auf der Ampulle schräg nach oben richten! Die Sollbruchstelle liegt genau unterhalb des Punktes in der Einengung.	2. Daumen über den Farbpunkt positionieren und den Ampullenspieß bzw. -kopf mit leichtem Druck nach unten abknicken.

Hersteller:

EIFELFANGO
Chemisch Pharmazeutisches Werk GmbH & Co. KG
Ringener Straße 45
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 02641/36061
Telefax: 02641/34056
E-Mail: email@eifelfango.de
Internet: www.eifelfango.de

Stand der Information:

Januar 2025

